

COOLSHAPING™

KRYOLIPOLYSE

Jetzt NEU!  
Doppelkinn-Extra-Aufsatz



## WELCHE ERGEBNISSE SIND ZU ERWARTEN?

Klinische Studien belegen, dass das Kälte-Verfahren bei fachgerecht ausgewählten Kunden innerhalb von 2 - 4 Monaten nach der Behandlung zu einer deutlich sichtbaren und messbaren Fettreduzierung führen kann. Erste Ergebnisse können aber bereits nach der 1. bzw. 2. Sitzung innerhalb von 30 bis 40 Tagen beachtlich sein. Durchschnittlich können in einer Kryolipolyse Sitzung bis zu 27 % der Fettzellen in dem behandelten Hautareal von der Kälte beeinflusst und durch Zelltod (Apoptose) beseitigt werden und führen dadurch zu einer merklich erkennbaren sowie messbaren **Volumenminderung**.

## WELCHE RISIKEN GIBT ES?

Das Kryolipolyse-Verfahren ist nahezu schmerzfrei und risikoarm. Nach der Anwendung fühlt sich das Gewebe kurzfristig wie ein festes Butterstück an. Nach dem schnellen Auftauen ist die Haut kurzzeitig gerötet und geschwollen. Durch den entstehenden Unterdruck während der Behandlung kann es zu leichtem vorübergehendem Druckschmerz, evtl. zu Blutergüssen und für einige Minuten zu einem Taubheitsgefühl und Kribbeln kommen. Das alles vergeht nach kurzer Zeit.



**SCHROEDER**  
physiotherapie | fitness | osteopathie  
beauty | wellness

Anelore Schroeder  
Hauptstraße 28 · Gesundheitszentrum · 88677 Markdorf  
Fon 07544 952 33 80 · Fax 07544 952 33 89  
www.schroeder-markdorf.de

**SCHROEDER**  
physiotherapie | fitness | osteopathie  
beauty | wellness



**cooltech**®

**COOLSHAPING™  
KRYOLIPOLYSE**

*Fett  
wegfrieren*

NICHT INVASIVES VERFAHREN  
ZUR GEZIELTEN BEHANDLUNG  
HARTNÄCKIGER FETTDEPOTS  
MIT HILFE KONTROLLIERTER KÄLTE



COOLSHAPING™

# KRYOLIPOLYSE

Die Kryolipolyse bzw. das Coolshaping ist eine effektive Form, um lokalisiertes Fett auf schmerzfreie Art selektiv und ganz ohne Einschnitte in der Haut dauerhaft zu entfernen. Sie stellt ein nicht invasives Verfahren dar, welches auf der Tatsache beruht, dass Fettzellen kälteempfindlicher sind als alle anderen Zellen. Mittels einer Vakuumpumpe wird die Haut mit dem unerwünschten Fettgewebsanteil in den Applikator gezogen. Darin wird das Gewebe kontrolliert auf ca. +4 °C Grad heruntergekühlt und diese Temperatur über +/-1 Stunde gehalten. Das löst einen natürlichen Entfernungsprozess aus, der schrittweise die Dicke der Fettschicht reduziert. Die Fettzellen werden durch die normalen Stoffwechselprozesse schrittweise abgebaut. Beste Ergebnisse gibt es mittels einer sofort danach verabreichten Endermologieanwendung (Lipomassage/LPG Behandlung).

## WANN WIRD KRYOLIPOLYSE ANGEWENDET?

Für gesunde Menschen mit normalem Ernährungs- und Bewegungsverhalten, aber mit lokalen Fettpölsterchen, die auf Diäten oder Sport nicht ansprechen, ist das Kryolipolyse-Verfahren das „Mittel der Wahl“. Kryolipolyse wird lokal an bestimmten Problemzonen angewendet.

Das cooltech System ist ein neuartiges Gerät zur Kryolipolyse Behandlung und bietet eine fortschrittliche Methode zur Körperformung. Das System vereint dank Integrated Technology™ eine Kombination von Kryo, Vakuum und LED und erhöht die Präzision bei der Behandlung von Fett und Cellulite. Es bietet vier unterschiedlich große Applikatoren und erlaubt so fast jedes Areal effizient zu behandeln.



KRYOLIPOLYSE

# COOLSHAPING™

## WIE VERLÄUFT DIE BEHANDLUNG?

Eine gelartige Kälteschutzmembran wird auf die zu behandelnde Hautzone aufgesetzt. Der Behandlungskopf mit einer weichen Silikonauflage erzeugt ein sanftes Vakuum. In der Folge wird das Areal vom Körper weg an die Kälteplatten im Behandlungskopf gesogen. Der Behandlungskopf gibt kontrolliert und gezielt Kälte über die Hautoberfläche ab. Sie können während der gesamten Behandlungszeit entspannen.

Um den Therapieerfolg zu maximieren, können 2 bis 3 Einzelsitzungen am gleichen Körperareal durchgeführt werden. Eine Einzelsitzung dauert ca. 60 Minuten und kann im Abstand von 4 Wochen wiederholt werden.

Bei den Folgesitzungen wird der Behandlungskopf leicht versetzt auf die Hautzone gesetzt, um die best- und größtmögliche Wirkung zu erzielen.


EFFEKTIVE & EFFIZIENTE KÖRPERFORMUNG  
SCHMERZFREI | SELEKTIV | NICHT INVASIV

## WELCHE KÖRPERSTELLEN WERDEN BEHANDELT?



Unterschiedlich große Vakuum-Applikatoren erlauben den Einsatz an verschiedenen Körperarealen: **Oberarme, Rücken (z. B. Rollen unter dem BH), Hüfte, Oberbauch, Unterbauch, Oberschenkel innen und außen, Reiterhose.**

Jetzt NEU!  
Doppelkinn-Extra-Aufsatz

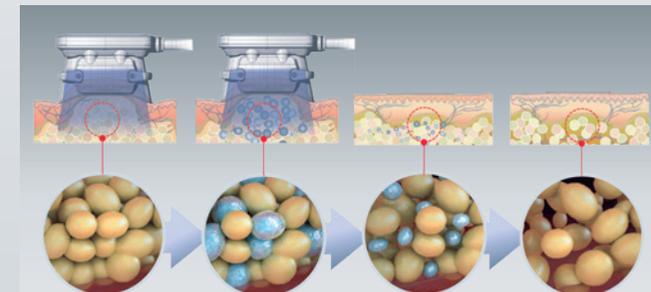

Das cooltech Handstück am Zielareal ansetzen und mit der Kühlung beginnen, damit die Zellen einer Apoptose zugeführt werden können.

Die Fettzellen im Behandlungsareal fangen an, auf die Kälte zu reagieren.

Nach der Behandlung sterben die Zellen biologisch ab und werden auf natürliche Weise verstoffwechselt.

Durch den kontrollierten Zelltod sind ein Teil der Fettzellen abgestorben.